

Betriebsanleitung BA

Stand der technischen Betriebsanleitung: 09/95

1. Allgemein:

- 1.1. Produktbezeichnung:** DIA-QUICK 303-0000
- 1.2. Lieferumfang:** 10 St. Diamantimprägnierte Filzscheiben
1 St. Gebrauchsanleitung
- 1.3. Herstelleranschrift:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: 07733-9410-0; FAX: 07733-9410-22
- 1.4. Lagerbedingungen:** - kühl und trocken lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Zur Oberflächenpolitur von Keramik- und Kunststoffmaterialien in der Zahntechnik, insbesondere von Kronen und Brücken außerhalb der Mundhöhle. - **Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!** -

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Filzscheiben nur auf geeignete Mandrells aufschrauben
2. Umdrehungszahl der Filzscheibe bei Gebrauch 5.000-10.000 UpM.
3. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen. (Verschluckungsgefahr !)
4. Nicht ohne Schutzbrille und Mundschutz arbeiten (Fremdkörper in Mund und Augen)

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vorbereitung

Filzrad auf ein für die Umdrehungszahl und Filzradform geeignetes Mandrell aufschrauben

4.2. Anwendung

Im vorgegebenen Drehzahlbereich untermäßigem Druck die gewünschten Oberflächen polieren.
Die Polierrichtung der Oberfläche immer wieder verändern, am besten kreisförmig rotieren.
Bei Nachlassen der Polierwirkung ist das Filzrad auszuwechseln

4.3. Nach Betrieb:

- Das zu polierende Objekt unter fließendem Wasser reinigen
- Das benutzte Filzrad kann im Kunststoffröhrchen der Originalverpackung oder in handelsüblichen Haltevorrichtungen bis zur nächsten Anwendung gelagert werden

5. Entsorgung: Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

6. Haltbarkeit: Verbrauchsmaterial sollte generell nach öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend weniger Monate aufgebraucht werden.

**YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3 D-78234 Engen
Tel.:07733/9410-0 Fax:07733/2533**