

Technische Betriebsanleitung
Instructions of use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso

für / for / pour / per / para

Handstück für Waxer NT & Waxer NT light, **Easy Waxer** & pro Waxer

Handpiece for Waxer NT & Waxer NT light, **Easy Waxer** & pro Waxer

Pièce à main pour Waxer NT & Waxer NT light, **Easy Waxer** & pro Waxer

Impugnatura per Waxer NT & Waxer NT light, **Easy Waxer** & pro Waxer

Pieza de mano para Waxer NT & Waxer NT light, **Easy Waxer** & pro Waxer



YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3
D-78234 Engen / Germany
www.yeti-dental.com

1. Allgemein:

1.1. **Produktbezeichnung:** Handstück für Duo WAXER NT, **EASY WAXER**, WAXER NT LIGHT 411-1001 und PRO WAXER/ **DUO** (neue Version) und alte Version mit Winkelstecker 411-1000

1.2. **Lieferumfang:** 1 Handstück (+ Verbindungskabel und Verbindungsstecker)

1.3. **Herstelleranschrift:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: 07733-9410-0 FAX: 07733-9410-22
www.yeti-dental.com weitere BA und Konformitätserklärungen

1.4. **Leistungsmerkmale vom zu betreibenden Gerät:** siehe WAXER (BA)

1.5. **Lagerbedingungen:** - trockene Lagerung, Schutz vor Säuren und Laugen, Lagerung bei Zimmertemperatur

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Unser Handstück sind ausschließlich als Handstück für die Geräteserie WAXER NT, PRO WAXER, **EASY WAXER** und NT LIGHT der Firma YETI Dentalprodukte bestimmt. Das damit komplette Wachsmesser dient ausschließlich zur Verarbeitung von Modellierwachsen welche für die Zahntechnik bestimmt sind. **Nicht zur Anwendung am Menschen zugelassen! Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche!**

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, dass sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit den Geräten nicht in Berührung kommen. Zur Arbeit mit unseren Geräten sind ausschließlich Zahntechniker oder vom Laborinhaber berechnete und eingewiesene Personen befugt. Vor Inbetriebnahme des WAXER's muß der Techniker die Betriebsanleitung lesen und bei noch auftretenden Unklarheiten beim Hersteller rückfragen.
2. Achtung Verbrennungsgefahr beim Berühren des Heizstabes und der Modelliersonden.
3. Modifizieren der Handstücke und Sondenformen geschieht ausschließlich auf eigene Verantwortung
4. Handstück darf ausschließlich vom Hersteller geöffnet werden, bei Zuwiderhandlung erlöschen sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche.
5. Bei Rücksendung, z.B. zu Reparaturzwecken, bruchsicher verpacken!

Weitere Risiken und Gefahren im Umgang mit dem kompletten Wachsmesser in der Gebrauchsanleitung für den WAXER nachlesen.

4. Bedienungsanleitung:

- Handstück aus der Verpackung entnehmen
- das Kabel glätten und auf Transportschäden überprüfen
- den Stecker in die dafür vorgesehene Buchse am Gerät stecken
- eine Modellierspitze auf den Heizstift aufsetzen

Weitere Bedienung des kompletten Wachsmessers in der Gebrauchsanleitung für den WAXER nachlesen.



- a - Handstück
- b - Modellierspitze
- c - Heizstab
- d - Griffstück
- e - Handstückkabel
- f - Metallring

5. **Entsorgung:** Bei der Entsorgung sind die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

6. **Garantie:** Handstücke und Sonden sind Verbrauchsmaterial und unterliegen keinen Garantiezeiten !

7. Ersatzteil- und Zubehörteilliste:

- 411-0100 PKT1 fein
- 411-0200 PKT2 dick
- 411-0300 Hollenback
- 411-0400 Messerform
- 411-0500 Korkenzieher fein
- 411-0600 Korkenzieher dick
- 411-9500 S-Ringe für das Handstück schwarz
- 411-1000 Handstück mit Winkelstecker
- 411-1001 Handstück mit Chinchstecker

