

Betriebsanleitung BA

Stand der technischen Betriebsanleitung 1/96

1. Allgemein:

- 1.1. Produktbezeichnung:**
- | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| IQ Sticks | 768-2500 | 2,5 mm | IQ Sticks | 768-3000 | 3,0 mm |
| IQ Sticks | 768-3500 | 3,5 mm | IQ Sticks | 768-4000 | 4,0 mm |
| IQ Sticks | 768-5000 | 5,0 mm | | | |
| IQ Triangel | 758-5000 | 4 mm | | | |
| IQ Triangel | 759-5000 | 5 mm | | | |
| IQ Quadro Sticks | 765-5000 | 2,5 mm | | | |
| IQ Quadro Sticks | 766-5000 | 3,0 mm | | | |
- 1.2. Lieferumfang:** **Sticks rund** Wachsstangen rot, extrahart ; 250 gr. Inhalt
Triangel Gußbalken rot, extrahart; 50 St. Inhalt
Sticks quadratisch Wachsstangen hellgrün, extrahart ; 50 gr. Inhalt
- 1.3. Herstelleranschrift:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: 07733-9410-0 FAX: 07733-2533
- 1.4. Lagerbedingungen:** Lagerung bei Raumtemperatur min +10° C bis + 30° C
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, bei Temperaturen unter 8° C besonders bei Temperaturen im Minusbereich erhöhte Bruchanfälligkeit
Packungen vor Schlag und Sturz schützen -

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Wachsstangen und Triangel zur Verwendung im zahntechnischen Labor, besonders in der Gußtechnik als Gußkanalsysteme. Durch Erwärmung (offene Bunsenflamme/Wasserbecken) sind die angebotenen Durchmesser in der Form veränderbar. Vor dem Verwachsen sollten die Stangen / Triangel erst wieder auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

Triangel können durch leichtes Erwärmen in der Mitte des Querbalkens leicht aufgebogen werden, und so der Muffelwandung angepaßt werden.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen.
2. Heiße Wachstropfen auf Hautoberflächen vermeiden. Einatmen der Wachsämpfe beim Verbrennen/Ausbrennen vermeiden.

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vorbereitung

Gewünschtern Durchmesser auswählen. Verpackung auf der oberen Seite öffnen.

4.2. Anwendung

Wachsstangen /Triangel gem. gußtechnischen Anforderungen mit erwärmtem Wachsmesser nach Bedarf kürzen. Gußbalkensysteme mit erwärmtem Wachs verwachsen. Am besten mit der gleichen Wachssorte ! Auf Raumtemperatur abkühlen, falls gewünscht Netzmittel (142-0000) auftragen, einbetten.

4.3. Nach Anwendung

Reststücke der Wachsstangen in Behältnis zurücklegen, Deckel schließen, vor Staub schützen.

- 5. Entsorgung:** Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

- 6. Haltbarkeit:** Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.