

Instrucciones de uso

estado de la instrucción técnica: 09/95

1. General:

- 1.1. Artículo:** DIA-QUICK fieltros diamantados, art. 303-0000
- 1.2. Forma de suministro:** 10 fieltros impregnados con diamantes
1 Instrucción de uso
- 1.3. Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: +49-7733-9410-0; FAX: +49-07733-9410-22
- 1.4. Condiciones para la colocación o depósito:** - conservar en un lugar fresco y seco
- proteger ante rayos solares

2. Uso determinado:

Para el pulido de materiales de cerámica y de plástico en la técnica dental, sobre todo de coronas y puentes en el exterior de la cavidad bucal.

¡ En el caso de una aplicación no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garantía o responsabilidad!

3. Riesgos y peligros durante el uso:

1. Enroscar los fieltros para el lucimiento solo sobre mandriles adecuados.
2. Durante el uso el número de rotaciones debe de ser de 5.000-10.000 r/m.
3. Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.
4. No trabajar ni sin gafas de protección ni sin máscara de protección.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Enroscar el fieltro sobre un mandril apropiado.

4.2. Servicio:

Lucificar la superficie deseada bajo presión moderada con el número de rotaciones aconsejado.
Cambiar continuamente la dirección de la superficie, mejor en dirección circular.
En caso de desgaste del efecto lucificante cambiar el disco de fieltro.

4.3. Después del procedimiento:

- Limpiar la pieza lucificada debajo de agua corriente y secarla bien.
El fieltro utilizado puede ser conservado en el embalaje original (tubo de plástico).

5. Eliminación: Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte las autoridades competentes.

6. Garantía: Los materiales de consumo en general deben usarse en pocos meses después de abrir el embalaje original.

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3 D-78234 Engen
Tel.:+49-7733/9410-0 Fax:+49-7733/2533