

# Instrucciones de uso DUO WAXER NT

Estado de la instrucción técnica: [1/2007](#) y las directivas de CE: [1/2007](#)



**1. General:** **Espatula eléctrica**

**1.1. Artículo:** **Duo Waxer NT 230 V** **414-9000**  
**Duo Waxer NT 115 V** **414-9115**

**1.2. Forma de suministro:** **DUO Waxer NT incl. base CPU**  
-2 piezas de mano con cable de conexión  
-2 puntas para modelar PKT 1+2  
-2 pinzas de encastre para la pieza de mano

**1.3. Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Tel.: +49-7733-9410-0 FAX: +49-7733-9410-22  
[www.yeti-dental.com](http://www.yeti-dental.com) más instrucciones de uso y declaraciones de conformidad

**1.4. Anotaciones de la marca depositada:** **DGBM**

**1.5. Datos técnicos:**

tensión de red:	230V +/- 10%	/	115V
frecuencia:	AC 50Hz	/	AC 50/60Hz
conexión:	enchufe Schuko/ alemán	/	US Schuko
potencia absorbida:	9-12 W	/	9-12 W
fusible:	T 400 mA	/	T 400 mA
protección de seguridad:	toma de tierra	/	toma de tierra

**1.6. Condiciones para la colocación o depósito:**

- poner horizontal, seguro y que no resbale
- depósito seco a temperatura de ambiente
- proteger ante contacto con ácidos y demás daños eventuales

**2. Instrucciones de uso:**

**Nuestras espátulas eléctricas WAXER deben de ser utilizadas solamente para el trabajo con cera de modelar para odontotécnica. En el caso de utilización contra estas normas no asumimos ninguna garantía o responsabilidad por eventuales daños.**

**3. Riesgos y peligros durante el uso:**

1. Tome las precauciones necesarias para asegurarse que personas indebidas (por ejemplo niños) tengan contacto con el aparato que debe de ser utilizado solamente por odontotécnicos o personal instruido autorizado. Antes de poner en uso leer atentamente las instrucciones de uso. En caso de preguntas o dudas pongase en contacto con su distribuidor o fabricante.
2. Usar el aparato solamente en lugares de trabajo secos; limpiar solo en seco y no meter jamas en recipientes con agua.
3. Tenga cuidado de no quemarse al tocar las puntas de modelar y/o la barra calentadora.
4. No tapar ni embalar el aparato cuando esta caliente.
5. Qualquier manipulación causa la perdida de garantía y qualquier otra pretención o demanda de daños y/o responsabilidad.
6. Intervenciones llevan a la perdida de garantía y no asumimos ninguna responsabilidad.
7. Para la limpieza del aparato no utilizar disolventes.
8. En caso de envío (por ejemplo para reparación) asegurar embalaje de modo perfecto para evitar daños de transporte.

**YETI Dentalprodukte GmbH Industriestr. 3 D-78234 Engen Tel.: 07733-9410-0 Fax.: 07733-9410-22**  
[www.yeti-dental.com](http://www.yeti-dental.com) [info@yeti-dental.com](mailto:info@yeti-dental.com)


## Instrucciones de uso DUO WAXER NT

### 4. Instrucciones de uso:

#### 4.1. 4.1. Advertencia antes de poner en función:

Nuestras espátulas eléctricas WAXER han sido producidas según los últimos conocimientos técnicos y corresponden perfectamente a las normas de seguridad, no obstante pueden surgir peligros en caso de uso no debido a las normas.

- El aparato solamente puede ser usado en perfecto estado, observando de modo preciso las instrucciones de uso.
- Prestar atención a las reglas de seguridad
- El aparato debe de ser usado solo por personas cualificadas
- El aparato debe de ser examinado atentamente (sobre todo el cable de la corriente) y utilizado solamente en estado técnicamente perfecto.
- Colocar la punta necesaria sobre la barra calentadora.
- Pegar la pinza de incastre art. 410-1002 para posicionar la pieza de mano después del uso.

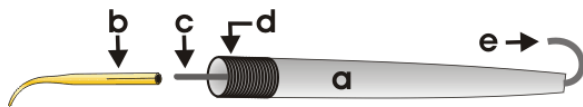

- a – pieza de mano    b – punta para modelar    c – resistencia  
d – anillos de goma antiresbalo    e – hilo de pieza de mano

#### 4.2. Betrieb:

1. Meter el enchufe (recuede solamente a los enchufes de corriente permitidos, vea punto 1.5.)
2. Encender el aparato – el botón para encender la espátula se encuentra en la parte trasera del aparato.
3. El aparato marca el tipo DUO WAXER NT y el fabricante YETI Dental. Luego aparecen enseguida las temperaturas en el Display de la pieza de mano derecha y izquierda, marcado en el panel por dos flechas. Las temperaturas pueden ser reguladas por separado para la pieza de mano izquierda y derecha. Pulsando los sensores +/- cambia las temperaturas de cambian memorizandose la ultima temperatura. Los sensores +/- estan separadas por el sensor (M). Pulsando el boton (M) cambia de fase M0,M1,M2 pudiendo memorizar varias temperaturas para las dos piezas de mano. Por lo cual tiene la posibilidad de memorizar den total 6 temperaturas. (2x3 temperaturas).
4. Coger una gota de cera con la punta caliente montada sobre la pieza de mano y empezar a modelar. Seguir con este procedimiento hasta complementar la modelación.
5. Tener cuidado al cambiar las puntas. En el caso de que vuelvan a utilizar instrumentos (por ejemplo pinzas) para ayudar el inserir de las puntas sobre las resistencias, se aconseja de coger la punta siempre sobre las 2 fresuras para evitar de apretarla e tener luego que forzar el inserirla.
6. Si no se utiliza el aparato por un periodo largo se aconseja de apagarlo y de inserir siempre la pinza de mano en la pinza de incastre.
7. Cuando deje el puesto de trabajo apage el aparato para evitar que se queme.
8. Si desea cambiar de sitio el aparato se ruega de hacerlo despues de dejar que se enfrie completamente.

#### Atención:

Les recomendamos que lean atentamente las instrucciones de uso antes de efectuar cambios técnicos. En caso de ya no tengas instrucciones de uso vean nuestra página [www.yeti-dental.com](http://www.yeti-dental.com)

## Instrucciones de uso DUO WAXER NT

**5. Eliminación:** para la eliminación del aparato seguir las normas vigentes.

**6. Garantía:** La garantía de nuestros aparatos es de 36 meses desde la fecha de compra. En este periodo YETI arregla los aparatos sin facturar gastos siempre y cuando se trate de un problema de material o de producción. Esto no es valido para las piezas de consumo, como por ejemplo las piezas de mano y/o las puntas para modelar.


### 7. Lista de piezas de recambio y accesorios:

Nuestro surtido en puntas de izquierda a derecha:

- art. n° 411-0100 PKT1 fina
- art. n° 411-0200 PKT 2 gruesa
- art. n° 411.0300 Hollenback horizontal
- art. n° 411-0400 Forma de cuchillo
- art. n° 411-0500 Forma de descorchador, fina
- art. n° 411-0600 Forma de descorchador, gruesa



410-1002 Pinza para pieza de mano, para todos los WAXER NT

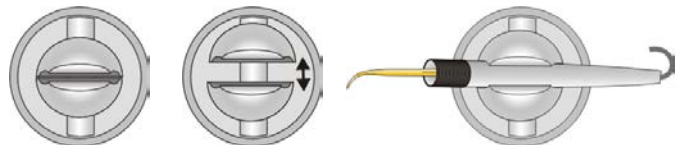

411-1001 Pieza demano para todos los aparatos NT y LIGHT Waxer

Anillos de goma para la pieza de mano:

411-4000 Anillos "S" para la pieza de mano 25 pc/negro

