

Instrucciones de uso

Página - 1 -

estado de la instrucción técnica 01/96

1. General:

1.1. **Artículo:** FINALE líquido para alisar las superficies en cera

1.2. **Forma de suministro:** 1 botella de 20 ml con pinzel para la aplicación

1.3. **Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen, Alemania

Teléfono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- tener en posición vertical a temperatura ambiental min. +15°C max. +30°C
- tener en un lugar seco y seguro, protegido ante caídas o golpes accidentales.

2. Uso determinado:

El líquido FINALE es una laca particularmente adherente sobre la cera. Alisa las superficies de cera: zonas oclusales, modelaciones en la prótesis total etc. Crea una capa fina de aproximadamente 2-3 micras. Quema sin dejar residuos. No es necesario aplicar un reductor de tensión.

¡En el caso de una aplicación no determinada la empresa Yeti Dentalprodukte GmbH no asume garantía o responsabilidad!

3. Riesgos y peligros durante el uso:

- Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.
- Aplicar solamente en lugares de trabajo seguros y tranquilos.
- En el caso de que el líquido sea mezclado con otros componentes pierde cualquier derecho de daño y/o responsabilidad.
- No fume durante el trabajo con FINALE. El líquido es inflamable y debe de ser protegido ante llama.

4. Instrucciones de uso:

4.1. **Preparación:** Asegurese de que la botella este entera y no rota.

4.2. Utilización:

- Aplicar uno o más extractos del líquido con el lápiz
- Tempo de secar: ca. 1 minuto.

4.3. Después del procedimiento:

- Una vez seco el barniz colocar enseguida el revestimiento.

5. **Eliminación:** Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte las autoridades competentes.

6. **Garantía:** Los materiales de consumo en general deben usarse en pocos meses después de abrir el embalaje original.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Alemania

Telefono 0049-7733-94 10 17 o 94 100 - Telefax 0049-7733-94 10 22