

Istrucciones de uso

estado de la instrucción técnica: 09/95

1. General:

- 1.1. **Artículo:** ISO QUICK Lápiz aislante, art. 550-0000
- 1.2. **Forma de suministro:** 1 Lápiz
1 Instrucciones de uso
- 1.3. **Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Telefono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax: 0049-7733-2533

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

conservar a temperatura ambiente, con las tapas de protección puestas.

2. Uso determinado:

ISO QUICK es usado para aislar la superficie de yeso, metal y cera de la cera para modelar. El lápiz ISO QUICK puede ser rellenado facilmente con aislante YETI LUBE. Para instrucciones de uso más detalladas vea los números 3 y 4. ¡En el caso de una aplicación no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garantía o responsabilidad!

3. Riesgos y peligros durante el uso:

Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Quitar la tapa de protección de la parte más fina del lápiz.

4.2. Servicio:

Aplicar el líquido aislante que se encuentra en el interior del lápiz sobre la superficie a aislar. (ver punto 2). El efecto aislante persiste durante horas después de la aplicación. Terminado el encerado se puede deslizar el modelado fácilmente del modelo. Para superficies más grandes utilice la parte más gruesa ISO QUICK.

4.3. Después del procedimiento:

Después de la aplicación cerrar bien el lápiz con sus tapas.

4.4. Rellenar:

Consumado el líquido rellenar nuevamente el lápiz. Quitar una de las dos puntas con una pinza. Ahora se puede rellenar fácilmente el lápiz versando YETI LUBE. Para rellenar más fácilmente recomendamos el YETI LUBE de 250ml, art. 550-0250

5. Eliminación:

Para eliminar el lápiz ISO QUICK seguir las respectivas normas vigentes.

6. Garantía:

Los materiales de consumo en general deben usarse en pocos meses después de abrir el embalaje original.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Alemania

Teléfono 0049-7733-94 10 17 o 94 100 - Telefax 0049-7733-2533