



## Instrucciones de uso

estado de la instrucción técnica 3/99

### 1. General:

<b>1.1. Artículo:</b>	<b>Cera para la registraci3n de mordidas, con aroma de naranja</b>	<b>extra dura</b>
	<b>Cera para la registraci3n oclusal reforzada con l3mina de metal</b>	<b>blanda</b>
	<b>Alu-Max Cera para la registraci3n de mordidas</b>	<b>dura</b>
<b>1.2. Forma de suministro:</b>	<b>Cera para la registraci3n de mordidas, naranja 2 mm (75 pz.)</b>	<b>606-2000</b>
	<b>Cera para la registraci3n, reforzada, marr3n 4 mm (60 pz.)</b>	<b>605-0060</b>
	<b>Planchas de cera con pigmentaci3n de metal (500 g.)</b>	<b>609-0500</b>
<b>1.3. Direcci3n del fabricante:</b>	<b>YETI Dentalprodukte GmbH – Industriestr. 3 - D-78234 Engen, Alemania</b> Tel.: +49-7733-9410-0; FAX: +49-7733-9410-22	

### 1.4. Condiciones para la colocaci3n o dep3sito:

Condiciones de dep3sito recomendadas: entre +10° C y + 30° C, protegidas de luz y golpes.  
Bajo temperaturas de menos de 8° C (especialmente menos de 0° C) elevado peligro de quebradero.

### 2. Uso determinado:

Cera para la registraci3n de mordidas en el consultorio odontol3gica para registrar la oclusi3n (durante poco tiempo) en la boca del paciente. La forma de las ceras se deja alterar calent3ndola (mediante un mechero Bunsen o en agua). Solamente personal instruido debe emblanecer o fluidificar la cera – siempre fuera de la boca del paciente - con instrumentos adecuados para la propia registraci3n de la oclusi3n. Introduzca solamente pedazos de cera lo suficiente grandes en la boca del paciente que no pueden ser tragados y no demasiado calientes para evitar sofocaci3n o quemaduras.

Las ceras de registraci3n con aluminio se dejan trabajar durante un tiempo m3s largo. Para evitar deformaciones no deseadas preste atenci3n en un tiempo de enfriamiento adecuado despu3s de la registraci3n de la mordida.

**¡En el caso de una aplicaci3n no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garant3a o responsabilidad!**

### 3. Riesgos y peligros durante el uso:

1. Tome las precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (p.ej. ni3os) no tengan contacto con el producto.
2. Evite gotas calientes en la piel y la aspiraci3n de los vapores de cera al quemarla (ropa protectora si fuera necesaria)
3. Se aplique el material apenas por corto tiempo en la boca del paciente, no para uso duradero.
4. Tome las medidas de seguridad necesarias para que el paciente no corra el peligro de atragantamiento, sofocaci3n o quemadura.

### 4. Instrucciones de uso:

#### **4.1. Antes del procedimiento:**

Abra el embalaje en el lado superior en el lugar marcado.

#### **4.2. Servicio:**

Desinfecte la cera y ad3ptela a la situaci3n bucal del paciente despu3s de calentarla ligeramente (mechero Bunsen/ ba3o Mar3a. Deje el paciente morder relajadamente en la cera de registraci3n y saque la cera de la boca del paciente.

#### **4.3 Despu3s del procedimiento**

Limpiar y eventualmente desinfectar el registrato

Cerrar la tapa del embalaje de la cera para protegerla de polvo.

**5. Eliminaci3n:** Para su eliminaci3n respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte las autoridades competentes.

**6. Garant3a:** Las materiales de consumo en general deben usarse en pocos meses despu3s de abrir el embalaje original. ¡Los aromas son sabor autentico y se desvanecen!