



## Instrucciones de uso

Situación de las instrucciones técnicas 1/96

### 1. General:

#### 1.1. Artículos:

Cera para registro amarilla, suave, con aroma de limón  
Cera para registro roja, dura, con aroma de fresa  
Cera para registro verde, semidura con aroma de manzana

#### 1.2. Forma de suministro:

Contenido	612-0490	amarillo suave	612-1850	Contenido
490 gr.	613-0490	rojo dura	613-1850	1850 gr.
	614-0490	verde semidura	614-1850	

#### 1.3. Dirección del fabricante:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Tel.: 07733-9410-0; FAX: 07733-9410-22

#### 1.4. Condiciones de almacenamiento:

Almacenamiento en temperatura ambiente min. +10° C max. +30° C  
Proteger ante los rayos de sol  
Temperaturas por debajo de los 8° C aumentan la fragilidad  
Mantengase en un lugar seguro, protegido de golpes, de caídas accidentales e de otros daños eventuales

### 2. Uso determinado:

Las ceras para registro son usadas para la prótesis parcial y entera en el laboratorio de ortodoncia. El dentista puede proceder en la boca del paciente a la registración de la oclusión. Calentanda con el mechero bunsen o en un baño de agua la cera queda moldeable. El proceso de reblandecimiento y fluidificación debe de ser efectuado con instrumentos adecuados y por personal cualificado y adecuadamente instruido, siempre fuera de la cueva bucal del paciente. Sólomente piezas suficientemente grandes y no muy calientes pueden ser introducidas en la boca del paciente para evitar un atragantamiento, una sofocación o una quemadura de las membranas mucosas. **¡Cualquier utilización no determinada conduce a la pérdida de garantía y responsabilidad!**

### 3. Riesgos y peligros durante el uso de los dos aparatos:

1. Tome las precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (p.ej. niños) no tengan contacto con el producto.
2. Evite gotas calientes en la piel y la aspiración de los vapores de cera al quemarla.
3. Se aplique el material apenas por corto tiempo en la boca del paciente, no para uso duradero.
4. Tome las medidas de seguridad necesarias para que el paciente no corra el peligro de atragantamiento o sofocación.

### 4. Instrucciones de uso:

#### 4.1. Antes del procedimiento:

Abra el embalaje en el lado superior en el lugar marcado.

#### 4.2. Servicio:

Corte las barras de cera con una cuchillo de cera calentado o otro instrumento adecuado. Calentar ligeramente la cera con el mechero bunsen o en un baño de agua y aplicarla y moldearla sobre la base de soporte. En caso de pequeñas piezas presten atención a que se estabilicen bien para que no se puedan despegar de la base.

#### 4.3. Después del procedimiento:

Guarde restos que pueda volver a utilizar en el embalaje, cierre la tapa para proteger la cera del polvo.

**5. Eliminación:** Para su eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte las autoridades competentes.

**6. Haltbarkeit:** Los materiales de consumo en general deben de ser usados en pocos meses después de abrir el embalaje original. ¡Los aromas son de sabor autentico y se desvanecen!