



1. General:

1.1. Artículo y

1.2. forma de suministro:

- SPEZIAL verano, media dura, 1,25 mm 500g art. 650-0500, 2500g art. 650-2500
- SPEZIAL verano, media dura, 1,50 mm 500g art. 653-0500, 2500g art. 653-2500
- SPEZIAL invierno, blanda, 1,25 mm 500g art. 652-0500, 2500g art. 652-2500
- SPEZIAL invierno, blanda, 1,50 mm 500g art. 655-0500, 2500g art. 655-2500
- SUPERPINK media dura, elástica 1,25 mm 500g art. 660-0500, 2500g art. 660-2500

1.3. **Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Teléfono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- tener a temperatura ambiental min. +10°C max. +30°C
- proteger ante rayos solares
- temperaturas inferiores a los +8°C aumentan la fragilidad
- tener en un lugar seco, protegido de golpes, de caídas accidentales y de ulteriores daños eventuales

2. Uso determinado:

Las ceras en plancha son utilizadas para la prótesis parcial y total en el laboratorio odontotécnico, como base para montar dientes y para la prueba de ello en la boca del paciente. La cera derretida es trabajada con instrumentos apropiados para el encerado y el modelado y solo por personas instruidas. **El trabajo y la modelación de las ceras debe de ser hecho fuera de la boca del paciente. En caso de un uso no determinado la empresa no asume garantía o responsabilidad!**

3. Riesgos y peligros durante el uso:

- Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.
- Evitar que gotas calientes de cera caigan sobre la piel (riesgo de quemadura). Si la cera caliente tiene contacto con agua puede saltar de modo incontrolable causando heridas.
- Evitar la inspiración de vapor que pueda proceder de la fusión de la cera.
- Colocar la base de cera de manera que el paciente no pueda tragarla accidentalmente.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Abrir la caja en la apertura prevista

4.2. Servicio:

Cortar la plancha de cera con una espátula apropiada o con un instrumento caliente. Calentar la cera con el bunsen (gas) o en un baño de agua hasta que tenga una consistencia plástica, fácil de modificar y modelar. Adaptar con las manos o con un instrumento adecuado la plancha de cera al modelo anteriormente aislado con YETI LUBE art. 550-0060.

4.3. Después del procedimiento:

- Poner los restos de cera en su caja original
- Cerrar la caja y protegerla de polvo

5. **Eliminación:** Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.

6. **Garantía:** Los materiales de consumo en general deben de ser usados en pocos meses después de abrir el embalaje original.