



1. General:

1.1. Artículo:

- SOLIDUS 80 cera rosa en plancha para la prótesis total 1,5 mm dura, **art. 680-0000**
- SOLIDUS 84 cera rosa en plancha para la prótesis total 1,5 mm extra dura, **art. 684-0000**

- 1.2. Forma de suministro:** SOLIDUS 80 contenido 500 gr.
SOLIDUS 84 contenido 500 gr.

- 1.3. Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Teléfono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- tener a temperatura ambiental min. +10°C max. +30°C
- proteger ante rayos solares
- temperaturas inferiores a los +8°C aumentan la fragilidad.
- Tener en un lugar seco, protegido de golpes, de caídas accidentales y de ulteriores daños eventuales

2. Uso determinado:

Las ceras en plancha son utilizadas para la prótesis parcial y total en el laboratorio odontotécnico, como base para montar dientes y para la prueba de ellos en la boca del paciente. La cera derretida es trabajada con instrumentos apropiados para el encerado y el modelado y solo por personas instruidas. **El trabajo y la modelación de las ceras debe de ser hecho fuera de la boca del paciente. En caso de un uso no determinado la empresa no asume garantía o responsabilidad.**

3. Riesgos y peligros durante el uso:

- Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con SOLIDUS.
- Evitar que gotas calientes de cera caigan sobre la piel (riesgo de quemadura). Si la cera caliente tiene contacto con agua puede saltar de modo incontrolable causando heridas.
- Evitar la inspiración de vapor que pueda proceder de la fusión de la cera.
- Colocar la base de cera de manera que el paciente no pueda tragarla accidentalmente.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Abrir la caja en la apertura prevista

4.2. Servicio:

Cortar la plancha de cera con una espátula apropiada o con un instrumento caliente. Calentar la cera con el bunsen (gas) o en baño de agua hasta que tenga una consistencia plástica, fácil de modificar y modelar. Adaptar con las manos o con un instrumento adecuado la plancha de cera al modelo anteriormente aislado con YETI LUBE art. 550-0060.

4.3. Después del procedimiento:

- Poner los restos de cera en su caja original
- Cerrar la caja y protegerla de polvo

5. Eliminación: Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.

6. Garantía: Los materiales de consumo en general deben de ser usados en pocos meses después de abrir el embalaje original.