



1. General:

1.1. Artículo y

1.2. forma de suministro:

PRECI TRAY bases de resina fotopolimerizables 50 pz.

- color rosa **art. 890-1000**
- color azul **art. 890-1010**
- color blanco **art. 890-1020**

1.3. Dirección del fabricante: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Teléfono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax:0049-7733-9410 22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- tener a temperatura bajo 20°C
- proteger de rayos solares, teniendo el material siempre bien cerrado en la caja negra
- tener en un lugar seguro y protegido de golpes, de caídas accidentales y de eventuales daños posibles

2. Uso determinado:

PRECI TRAY bases en resina, para el uso individual. El proceso de adaptación y de polimerización debe de ser hecho solo con instrumentos adaptados y por personas calificadas y adecuadamente instruidas siempre fuera de la boca del paciente. Para sacar la impresión en la boca del paciente tener la cubeta bien fotopolimerizada y de una dimensión que evite que el paciente pueda tragarla o se ahogue. En el caso de una aplicación no determinada la empresa no asume garantía o responsabilidad.

3. Riesgos y peligros durante el uso:

- Prestar atención que personas incompetentes (por ejemplo niños) utilicen y/o puedan venir en contacto con el material.
- El material fotopolimerizable solo debe de ser introducido en la boca del paciente por breve tiempo y no de modo prolongado o permanente.

4 Instrucciones de uso:

4.1. Preparación: Abrir la caja por la apertura prevista, cojer una base y volver a cerrar enseguida la caja.

4.2. Utilización:

- Quitar las hojas protectivas de la placa, adaptar la misma sobre el modelo y cortar los bordes. Formar el mango con el material restante. Fotopolimerizar la cubeta en el aparato de fotopolimerizar. Después quitar la cubeta del modelo y polimerizar la parte interna (que estaba en contacto con el modelo en yeso) durante un tiempo identico. El extracto pegajoso de la superficie es fácil de eliminar bajo el agua corriente o con un detergente alcohólico que sea aceptado por el paciente.

5. Eliminación: Para eliminar el material seguir las normas vigentes.

6. Garantía: Es aconsejable utilizar un producto dentro de 12 meses desde la fecha de apertura del embalaje original.