

# Mode d'emploi

---

## Situation du mode d'emploi technique 01/96

### 1. Généralités:

- 1.1. Désignation du produit:** Sati Brush n°. 310-0000
- 1.2. Volume de livraison:** Sac en matière plastique avec des roues de polissage  
Diamètre 13 mm/Conditionnement 50 pcs.
- 1.3. Adresse du fabricant:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Tél.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049-7733-941022
- 1.4. Conditions de stockage:** Stockage au sec et au frais.  
Protéger les emballages contre coups et chutes.

### 2. Utilisation adéquate:

Pour le polissage de surfaces de matériaux métalliques en dehors de la bouche du patient.  
Satinage des surfaces occlusales en métal déjà polies pour repérage aisé des points de contact prématurés pendant la phase de réglage de l'occlusion des prothèses conjointes.  
**Emploi hors de la bouche du patient.**

**Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l'extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité!**

### 3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

1. Visser seulement les roues Sati Brush sur des mandrins adéquats.
2. Vitesse de rotation recommandée 5.000-10.000 T/mn.
3. S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit (danger d'avaler)!
4. Ne travaillez pas sans lunettes de protection et sans protection de la bouche (corps étranger dans la bouche et les yeux).

### 4. Mode d'emploi:

#### **4.1. Avant l'utilisation:**

Visser la roue Sati Brush sur un mandrin adapté à cet usage.

#### **4.2. Usage:**

Travailler la surface de métal avec une légère pression à la vitesse de rotation recommandée.  
Lorsque l'effet de satinage diminue en cours de travail, utiliser une roue Sati Brush neuve.

#### **3. Après usage:**

Nettoyer sec ou avec de l'eau l'objet satiné.  
Les roues Sati Brush utilisées sont réutilisables plusieurs fois.

**5. Elimination:** Peut être éliminé dans les déchets normaux.

**6. Durabilité:** Les produits de consommation doivent être utilisés rapidement après ouverture.  
Les substances de goût ne sont pas toxiques.

---

**YETI Dentalprodukte GmbH  
Industriestraße 3 D-78234 Engen  
Tel.:07733/9410-0 Fax:07733/2533**