

Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique 09/95

1. Généralités:

- 1.1. Désignation du produit:** DIA-QUICK 303-0000
- 1.2. Volume de livraison:** 10 pcs de feutres diamantés avec imprégnation
1 pc de mode d'emploi
- 1.3. Adresse du fabricant:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestrasse 3 - D-78234 Engen
Tél.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049- 7733-2533
- 1.4. Conditions de stockage:** - Stockage au sec et garder au frais
- Protéger contre insolation directe

2. Utilisation adéquate:

Notre DIA-QUICK sert au polissage de surface des matériaux céramiques et plastiques dans la technique dentaire - bridges et couronnes - en dehors de la cavité buccale. - **Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l'extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité!** -

3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

Utiliser seulement des mandrins conformes.
La vitesse de rotation doit être de 5000 à 10000 t/mn.
S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit (danger d'avaler!).
Ne pas travailler sans lunettes protectrices ni masque.

4. Mode d'emploi:

4.1. Avant l'utilisation:

Utiliser seulement des mandrins conformes prévus pour la vitesse de rotation citée et pour le montage de feutres.

4.2. Usage:

Polir les surfaces désirées à la vitesse conseillée (5000 - 10000 t/mn) avec une légère pression.
En cours de travail, changer de place en effectuant des cercles.
Si l'efficacité du polissage diminue, changer le feutre.

4.3. Après usage:

- Nettoyez l'objet poli sous l'eau courante.
- Le feutre utilisé peut être conservé dans le tube original.

5. Elimination:

Peut être éliminé dans les déchets normaux.

6. Durabilité:

DIA-QUICK doit être utilisé rapidement après son ouverture.
Un trop long stockage, emballage ouvert, nuit aux caractéristiques techniques de DIA-QUICK.