

## **Mode d'emploi**

Situation du mode d'emploi technique 10/97 - Page 1

---

### **1. Généralités:**

**1.1. Désignation du produit:** „Finale“ liquide incolore pour lisser toute surface de cire,  
n° d'article 507-0000

**1.2. Volume de livraison:** 1 flacon 20 ml avec pinceau applicateur

**1.3. Adresse du fabricant:** YETI Dentalprodukte Industriestrasse 3 -  
D-78234 Engen/Allemagne  
Tél.: 0049-7733-94100 FAX: 0049-7733-941022

**1.4. Conditions de stockage:** FINALE doit être stocké fermé, au sec et vertical, à une température de + 15°C - + 30°C.  
Tenir éloigné de toute flamme ou corps incandescent.

### **2. Utilisation adéquate:**

FINALE est un liquide adhérent particulièrement bien à la cire créant des surfaces coulées d'une extrême finesse. S'utilise à la fin du modelage pour lisser toute surface de cire: faces occlusales - points de contact - maquettes de squelettés - prothèse adjointe - Epaisseur 2-3 microns. Brûle sans résidus. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un réducteur de tension sur FINALE.

**Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l'extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité.**

### **3. Risques et dangers pendant l'utilisation:**

S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit!

Respecter strictement le mode d'emploi!

En cours d'utilisation de FINALE, ne pas fumer et manipuler à l'écart de toute flamme ou corps incandescent - facilement inflammable -. A n'utiliser qu'aux lieux de travail avec une circulation d'air suffisante. FINALE ne doit être ni modifié ni mélangé, ce qui pourrait amener à une exonération de notre responsabilité et garantie.

### **4. Mode d'emploi:**

**4.1. Avant l'utilisation:** S'assurer que le flacon ne soit pas cassé.

**4.2 Usage:** Appliquer une ou plusieurs couche de FINALE avec le pinceau applicateur. Séchage 1 mn. environ, mise en revêtement immédiate.

**4.3. Après usage:** Refermer soigneusement le flacon!

**5. Elimination:** Selon les dispositions légales.

**6. Durabilité:** Matériau d'usage à utiliser rapidement après ouverture de l'emballage d'origine.

---

**YETI Dentalprodukte GmbH**

Industriestr. 3

D-78234 Engen - Allemagne

Tel.: 0049-7733-94100 / Fax 0049-7733-941022