



Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique 1/96

1. Généralités:

- 1.1. Désignation du produit:** Cire de réglage du mordu, aromatisée (orange) extra-dur
Cire renforcée au métal, brune souple
Alu-Max cire de réglage du mordu dur
- 1.2. Volume de livraison:** Cire de réglage du mordu, orange 2 mm 75 pcs 606-2000
Cire renforcée au métal, brune 4 mm 60 pcs. 605-0060
Cire en plaques pigmentée au métal 609-0500
- 1.3. Adresse du fabricant:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tél.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049-7733-2533
- 1.4. Conditions de stockage:** - Stockage au sec et garder au frais au moins +10°C jusqu'à +30°C
Protéger contre insolation directe, il y a une charge de rupture élevée
aux températures au dessous de 8°C particulièrement aux températures
au dessous de 0°C.
Protéger les emballages contre les coups et les chutes.

2. Utilisation adéquate:

Cire de réglage du mordu à l'usage dans le laboratoire dentaire particulièrement pour fixation dans la bouche du patient.

La forme de la cire de réglage du mordu est effectuée hors de la bouche du patient par des spécialistes à l'aide d'instruments adéquats. Ne mettre que des grandes pièces à température acceptée par la muqueuse dans la bouche du patient pour éviter d'avaler et de brûler.

Les cires en plaques avec pigments d'aluminium ont une très longue phase d'usure plastique. Il faut respecter un temps de refroidissement suffisant après la fixation pour éviter une déformation indésirable.

Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour l'extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité!

3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit (danger d'avaler)!

Évitez le contact de cire chaude avec la peau ainsi que l'inhalation de vapeurs de cire chaude (éventuellement des vêtements protecteurs).

Mettez la cire seulement à court terme dans la bouche du patient.

Il n'y a aucune mesure de sécurité concernant le risque d'avaler pour le patient.

Former des pièces de cire de réglage suffisamment grandes pour éviter d'avaler.

4. Mode d'emploi:

4.1. Avant l'usage:

Ouvrir l'emballage couvercle au dessus.

4.2. Usage:

Désinfecter la cire de réglage du mordu et après un échauffement (Bunsen/bain-marie) adaptez la à la situation de bouche du patient. Le patient mord dans la cire et après on peut la sortir de la bouche du patient.

4.3 Après usage:

Nettoyer et désinfecter la cire de réglage.

Fermer la couvercle pour la protéger contre la poussière.

5. Elimination:

Peut être éliminé dans les déchets normaux.

6. Durabilité:

**Les produits de consommation doivent être utilisés rapidement après son ouverture.
Les substances de goût ne sont pas toxiques.**

Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique 1/96