



## Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique 1/96

### 1. Généralités:

#### 1.1. Désignation du produit

Cire en plaque spéciale été (moyenne dure) et hiver (souple)  
Conditionnement 500g. et 2500 g.  
Cire en plaque superpink plastique (moyenne dure)  
Conditionnement 500 g. et 2500 g.

#### 1.2. Volume de livraison:

Spéciale été	500 g.	1,25 mm	650-0500	1,5 mm	653-0500
	2500 g.	1,25 mm	650-2500	1,5 mm	653-2500
Spéciale hiver	500 g.	1,25 mm	652-0500	1,5 mm	655-0500
	2500 g.	1,25 mm	652-2500	1,5 mm	655-2500
Superpink	500 g.			1,5 mm	660-0500
	2500 g.			1,5 mm	660-2500

#### 1.3. Adresse du fabricant:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Tél.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049-7733-2533

#### 1.4. Conditions de stockage:

Stockage au sec et garder au frais au moins +10° C jusqu'à + 30° C  
Protéger contre insolation directe, il y a une charge de rupture élevée  
aux températures au dessous de 8° C particulièrement aux températures  
au dessous de 0°C.  
Protéger les emballages contre les coups et les chutes.

### 2. Utilisation adéquate:

Cire en plaques à usage dans le laboratoire dentaire particulièrement dans la prothétique totale et partielle  
Utilisé comme „base cire en plaques“ et comme contrôle dans la bouche du patient.  
Le modelage de la cire chaude est effectué hors de la bouche du patient par des spécialistes à l'aide  
d'instruments adéquats.

**Toute utilisation non conforme à celle prévue aura effet pour l'extinction de tous les droits de  
garantie et nous délivre de toute responsabilité!**

### 3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit  
(danger d'avaler)!

Eviter le contact de cire chaude avec la peau (danger de brûlure).

Eviter l'inhalation de vapeurs de cire chaude.

Il est important de former exactement la cire en plaque pour éviter tout risque d'avaler au cours de  
l'essayage dans la bouche du patient.

### 4. Mode d'emploi:

#### 4.1. Avant l'utilisation

Ouvrir l'emballage couvercle au dessus.

#### 4.2. Usage:

Découper la plaque de cire avec un instrument adéquat chaud. Réchauffer la plaque de cire avec une  
source de chaleur (Bunsen/bain-marie) pour atteindre la malléabilité adaptée. Appliquer la plaque de cire  
avec les doigts ou instruments adéquats sur le modèle de travail isolé contre la cire  
(YETI Lube n°. 550-0060).

#### 4.3. Après usage

Remettre les résidus de plaque récupérables dans la boîte, fermer le couvercle pour les protéger contre  
la poussière.

**5. Elimination:** Peut être éliminé dans les déchets normaux.

**6. Durabilité:** Les produits de consommation doivent être utilisés rapidement après ouverture.