

Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique 1/96

1. Généralités:

- 1.1. Désignation du produit:** IQ Sticks 2,5 mm 768-2500
IQ Sticks 3,0 mm 768-3000
IQ Sticks 3,5 mm 768-3500
IQ Sticks 4,0 mm 768-4000
IQ Sticks 5,0 mm 768-5000
- IQ Triangel 4 mm 758-5000
IQ Triangel 5 mm 759-5000
- IQ Quadro Sticks 2,5 mm 765-5000
IQ Quadro Sticks 3,0 mm 766-5000
- 1.2. Volume de livraison:** IQ Sticks rond rouge, extra-dur, 250 g
IQ Triangel - triangle de coulée - extra-dur, 50 pcs.
IQ Quadro sticks vert, extra-dur, 50 g
- 1.3. Adresse du fabricant:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen/Germany
Tél.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049-7733-9410-22
- 1.4. Conditions de stockage:** Stockage à température ambiante au moins +10°C jusqu'au +30°C
Protéger contre insolation directe, il y a une charge de rupture élevée
aux températures au dessous de 8°C particulièrement au dessous de 0°C.
Protéger les emballages contre les coups et chutes.

2. Utilisation adéquate:

Sticks et Triangels pour emploi dans le laboratoire dentaire pour la technique de coulée.
Les diamètres offerts sont modifiables dans leur forme par échauffement (Bunsen/bain-marie).
Les Sticks et Triangels devront être échauffés avant modification de forme et refroidis avant leur utilisation.
Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l'extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité!

3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

S'assurer qu'aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n'entre en contact avec le produit (danger d'avaler)!

Évitez le contact de cire chaude avec la peau ainsi que l'inhalation de vapeurs de cire chaude.

4. Mode d'emploi:

4.1. Avant l'utilisation

Choisir le diamètre désiré. Ouvrir l'emballage couvercle au dessus.

4.2. Usage

Prendre les Sticks/Triangels avec soin.

Unir les Sticks/Triangels avec une cire chaude (le même type de cire étant le mieux).

Refroidir à température ambiante. Si désiré, appliquer notre liquide de détente (n°. 142-0000), après fixation définitive.

4.3 Après usage

Remettre les résidus récupérables dans la boîte, fermer la couvercle pour les protéger contre la poussière.

5. Elimination: Peut être éliminé dans les déchets normaux.

6. Durabilité: Les produits de consommation doivent être utilisés rapidement après ouverture.
Les substances de goût ne sont pas toxiques.