



1. Généralités:

1.1. Désignation du produit: PRECI TRAY Base en résine photopolymère n°. 890-1000 rose
n°. 890-1010 bleu
n°. 890-1020 clair

1.2. Volume de livraison: 1 boîte avec 50 pièces de PRECI TRAY

1.3. Adresse du fabricant: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tél.: 0049-7733 -9410-0 Fax: 0049-7733-941022

1.4. Conditions de stockage:

- stocker à une température inférieure à 20°C
- protéger des rayons solaires en conservant le matériau dans son emballage d'origine clos
- stocker dans un lieu sûr, protégé des coups, chutes accidentelles et d'éventuels autres dommages.

2. Utilisation adéquate:

PRECI TRAY bases en résine, sont à utiliser pour confectionner des PEI. Le processus d'adaptation et de polymérisation s'effectuent uniquement avec des instruments adaptés et par un personnel qualifié et correctement formé, toujours en dehors de la cavité buccale du patient. Pour la prise d'empreinte, introduire pour la cavité buccale uniquement un porte empreinte parfaitement photopolymérise et de dimensions telles que rien ne puisse être ingurgité et provoquer une asphyxie. **Un emploi hors de ces normes annule toute garantie et dégage le producteur de toute demande de dommages et / ou responsabilité.**

3. Risques et dangers pendant l'utilisation:

- faire attention qu'aucune personne incompétente (par exemple des enfants) n'utilise et / ou puisse être au contact avec le matériau (risque de déglutition).
- le matériau photopolymérisé est à introduire dans la cavité buccale uniquement pour un temps bref et non prolongé ou permanent.

4. Mode d'emploi:

4.1. Avant usage:

Ouvrir l'emballage selon le mode d'ouverture prévu. Retirer une base et refermer l'emballage immédiatement.

4.2. Usage:

1. Retirer les feuilles protectives de la plaque base, adapter celle-ci sur le modèle et couper les bords. Confectionner le manche avec le matériau excédent. Polymériser le porte empreinte obtenu dans l'appareil pour photopolymérisation. Retirer le porte empreinte du modèle et polymériser la partie interne (face du PEI qui était précédemment au contact avec le modèle en plâtre) pour un temps égal. La pellicule superficielle légèrement collante s'élimine facilement sous l'eau courante ou à l'aide d'un détergent alcoolique compatible avec l'hygiène du patient.

5. **Elimination:** pour l'élimination du matériau, suivre les normes en vigueur.

6. **Durabilité:** il est conseillé d'utiliser le matériau dans les 12 mois de la date d'ouverture de l'emballage d'origine.