

Istruzioni per l'uso

Pagina - 1 -

stato 09/95

1. Generale:

1.1. **Articolo:** DIA-QUICK feltrini diamantati, art. 303-0000

1.2. **Quantità di consegna:** 10 feltrini impregnati con diamante
1 Istruzioni per l'uso

1.3. **Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax: 0049-7733-2533

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- * tenere in luogo asciutto e in un ambiente fresco
- * proteggere dai raggi solari

2. Uso secondo le norme:

DIA-QUICK è utilizzato per lucidare superfici in ceramica e resina di ponti e corone **al di fuori del cavo orale**. Per istruzioni più dettagliate vedi punti n°3 e n°4. Da un utilizzo contro tali norme scade garanzia e qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- * Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino il DIA QUICK e/o possano venire a contatto con i feltrini. (rischio di deglutire)
- * Avvitare i feltrini solo su appositi mandrini.
- * Utilizzare i feltrini da 5.000 a 10.000 giri/min. e non oltre.
- * Proteggere il viso con occhiali e mascherina

4 Istruzioni d' uso:

4.1. Preparazione:

Avvitare il feltrino DIA QUICK su un mandrino adatto per dimensione e numero di giri/min.

4.2. Utilizzo:

Lucidare le superfici desiderate con il numero di giri consigliati (5000 - 10000 giri/min) con una leggera pressione, ruotando il pezzo. Fare attenzione a non surriscaldare il pezzo da lucidare. In caso di scarso effetto lucidante cambiare il feltrino.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- * Risciacquare i pezzi lucidati sotto l'acqua corrente.
- * Il feltrino utilizzato può essere riposto nel suo imballo originale (tubetto di plastica)

5. **Eliminazione:** Per l'eliminazione del DIA QUICK seguire la normativa vigente.

6. **Durevolezza:** **Di norma i materiali di consumo sono utilizzabili per pochi mesi dall'apertura dell' imballo originale.**

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania

Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-2533