



Istruzioni d'uso

Versione delle indicazioni tecniche d'uso: 6/2015

1. **Informazioni generali:** K2 Zirkon Liquid Dip & Brush realizzato da Yeti è un prodotto sanitario da utilizzare nel settore dentale. Le indicazioni sotto riportate contengono le istruzioni che devono essere tenute in stretta considerazione per garantire un uso appropriato e il rispetto delle condizioni di sicurezza. È indispensabile leggere le istruzioni prima del primo utilizzo di K2 Zirkonliquid Dip & Brush.

1.1 Colori	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2	BL1	GR 3	
Descriz./ del prod.	397...	-5001	-5002	-5003	-5004	-5007	-5011	-5014	-5017	-5019
K2 Liquid Dip & Brush										

1.2. **Denominazione dell'azienda:** YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestraße 3, D-78234 Engen, Deutschland
Tel. : 07733-94100 **Fax:** 07733-941022 **indirizzo e-mail:** info@yeti-dental.com
Domande tecniche: 07733-9410-20

2. K2 Zirkon Liquid deve essere utilizzato esclusivamente da personale tecnico dentale per le esigenze di restauro nella bocca del paziente. I prodotti K2 Zirkon Liquid Dip & Brush sono pronti per l'uso e a base d'acqua. Sono specificamente appropriati per i blanks di zirconio Yeti K2 e per colorare e pitturare completamente (tecnica di immersione) o parzialmente (tecnica brush) le parti di restauro con essi realizzate. Il liquido K2 Zirkon Liquid Dip & Brush deve essere conservato in luogo sicuro al riparo dal gelo e da impurità.

3. Istruzioni di preparazione

3.1 Indicazioni di lavorazione:

Solo addestrati ed esperti odontotecnici dispongono dei requisiti necessari per l'utilizzo corretto di questo prodotto medico. K2 Zirkon Liquid Dip & Brush è un prodotto semilavorato e deve essere professionalmente trattato secondo metodi approvati e a regola d'arte. I blanks di zirconio da immersione o per pittura Yeti K2 devono essere assolutamente asciutti e privi di grasso. In caso contrario, potrebbero verificarsi difetti nella colorazione.

3.2 Tecnica di immersione

Immergere la parte di restauro fresata in zirconio con un sostegno per materiali sintetici nel liquido per zirconio K2.

Si prega di non usare mai pinze di metallo. La parte restaurata deve essere completamente coperta dal liquido e rimanere 1-2 minuti completamente in immersione. Quindi rimuovere delicatamente con una pinzetta per materiali sintetici e tamponare con un pezzo di carta assorbente o con un batuffolo di cotone idrofilo.

3.3 Tecnica di colorazione

Le parti di restauro dovranno essere colorate con l'ausilio di un pennello pulito con colore dentina o colore smalto. Se il colore viene disposto più volte, la colorazione risulterà più intensa.

3.4 Processo di asciugatura

Le parti di restauro colorate mediante verniciatura o immersione devono essere sottoposte a una accurata preasciugatura prima della sinterizzazione. Questa operazione può essere effettuata per mezzo di un asciugatore ad aria o di una lampada ad infrarossi. A seconda delle dimensioni della parte di restauro in zirconio, il processo di asciugatura può subire delle variazioni.

La temperatura di asciugatura è di 60-80° C;

Il tempo di asciugatura è di 30-45 minuti.

Per le indicazioni sul successivo processo di sinterizzazione vedere il foglio illustrativo presente tutte le confezioni dei blanks di zirconio Yeti K2.

3.5 Istruzioni per la conservazione

Il prodotto K2 Zirkon Dip & Brush deve essere sigillato subito dopo l'uso e può essere riutilizzato fino a quando il prodotto è completamente consumato. In caso di urto possono presentarsi nelle parti di restauro delle sottili fessure o possono spezzarsi delle parti sottili. Pertanto si consiglia di maneggiare con cura la parti stesse al fine di evitare urti e colpi. Se, a seguito di controllo visivo dopo un urto o un colpo, si manifesta il dubbio di un danno si sconsiglia di procedere con la lavorazione (rischio di rottura durante la sinterizzazione).

Prima dell'inserimento della protesi in bocca deve essere attuata una pulizia e una sterilizzazione conforme alla buona pratica clinica.

Istruzioni d'uso

Versione delle indicazioni tecniche d'uso: 6/2015

4.0 Indicazioni sulla garanzia e prescrizioni di sicurezza

Sul Yeti K2 Liquido per zirconio si applica una garanzia di un anno contro i difetti di fabbricazione dovuti a difetti del materiale. La garanzia decade in caso di:

- Uso improprio dovuto al mancato rispetto delle prescrizioni fornite in questo documento,
- Stoccaggio non conforme o indurimento per evaporazione del liquido Yeti K2,
- Azione violenta o danno incorsi durante il trasporto dell'imballaggio, dal momento che non verranno intraprese azioni contro la compagnia di trasporto.

Nell'ambito della garanzia Yeti Dental Products GmbH fornisce la sostituzione gratuita del liquido per Zirconio, qualora utilizzato in minima parte e ancora fluido, a condizione che vengano restituite le parti difettose a scopo di analisi. Si escludono risarcimenti supplementari.

4.1. Servizio clienti:

Per eventuali problemi connessi con la lavorazione o suggerimenti per il miglioramento si consiglia di prendere nota del numero di lotto e di contattare Yeti Dental Products GmbH.

4.2 Smaltimento:

Dopo la pittura o l'immersione di parti restaurate o dopo l'inserimento nella bocca della protesi, il prodotto deve essere trattato come rifiuto sanitario speciale. A questo proposito si prega di tenere conto delle prescrizioni vigenti nei paesi di appartenenza.

Dati tecnici:

Confezione protettiva dall'esposizione alla luce	Color dentina A1; A2; A3; A3,5; B2; C2; D2;	100 ml
Confezione protettiva dall'esposizione alla luce	Color smalto BL 1 (blau) GR 3 (grau)	100 ml