

Istruzioni per l'uso

Pagina - 1 -

stato 09/95

1. Generale:

- 1.1. **Articolo:** ISO QUICK Pennarello Isolante, art. 550-0000
- 1.2. **Quantità di consegna:** 1 Pennarello
1 Istruzioni per l'uso
- 1.3. **Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax: 0049-7733-2533

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

tenere a temperatura ambiente, con i cappucci di protezione inseriti.

2. Uso secondo le norme:

ISO QUICK è utilizzato per isolare superfici in gesso, metallo e cera dalle cere di modellazione. Il pennarello ISO QUICK si può riempire facilmente con l'isolante YETI LUBE. Per istruzioni più dettagliate vedi punti n°3 e n°4. Da un utilizzo contro tali norme scade garanzia e qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino ISO QUICK e/o possano venire a contatto con il pennarello.

4 Istruzioni d' uso:

4.1. Preparazione:

Togliere il cappuccio di protezione dalla parte più fine del pennarello.

4.2. Utilizzo:

Applicare il liquido isolante che si trova nel pennarello con una leggera pressione sulle superfici da isolare. (vedi punto n° 2). L'effetto isolante persiste per ore dopo l'applicazione. Terminata la ceratura il modellato si può sfilare facilmente. Per superfici più ampie utilizzare la parte più grande e piatta di ISO QUICK.

4.3. Dopo l'utilizzo:

Dopo l'applicazione chiudere bene il pennarello con i suoi cappucci.

4.4. Riempimento:

Consumato il liquido isolante riempire nuovamente il pennarello. Togliere una delle due punte con una pinzetta. Ora il serbatoio di ricarica è accessibile e vi si può facilmente versare YETI LUBE. Per il suo beccuccio molto fine consigliamo il flacone YETI LUBE da 250 ml, art. 550-0250

5. Eliminazione:

Per eliminare il pennarello ISO QUICK seguire la normativa vigente.

6. Durevolezza:

Di norma i materiali di consumo sono utilizzabili per pochi mesi dall'apertura dell'imballo originale.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania

Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-2533