



1. Generale:

1.1. Denominazione del prodotto e

1.2. Quantità di consegna:

- Cera per registrazioni occlusali, 4,0 mm, rinforzato di metallo, marrone, morbida, 60 pz. art. 605-0060
- Cera per registrazioni occlusali, 2,0 mm, arancione con aroma di arancia, extra dura 75 pz. art. 606-2000
- ALU MAX Cera per registrazioni, duro, fogli di cera con pigmenti di metallo, 500g. art. 609-0500

1.3. Indirizzo del produttore: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen / Germania
Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere a temperatura ambiente min. +10°C max. +30°C
- proteggere dai raggi solari
- temperature al di sotto di +8°C ne aumentano la fragilità
- tenere in un luogo sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri danni

2. Uso secondo le norme:

Le cere per registrazioni vengono utilizzate dal medico dentista per la registrazione dell'occlusione nella bocca del paziente. Riscaldare e ammorbidire la cera di registrazione con il bunsen (becco a gas) o „in bagno d'acqua“. Questa lavorazione va eseguita solo con strumenti adatti e da personale qualificato e adeguatamente istruito, **comunque sempre al di fuori del cavo orale del paziente**. Per la registrazione è da immettere nel cavo orale solo cera non troppo calda (pericolo di bruciature alle mucose) e in dimensioni tali da evitare che possa essere ingoiata e provocare asfissia.

I registrati in cera con pigmenti di alluminio rimangono plastica per un tempo eccezionalmente lungo. È importante di lasciarlo raffreddare dopo la registrazione per evitare deformazioni non desiderati.

Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e / o possano venire a contatto con la Barre e Valli in cera (rischio di deglutizione)
- Evitare che gocce calde di cera cadano sulla pelle (rischio di bruciature). Se la cera calda viene a contatto con acqua può schizzare in modo non controllabile e causare ferite. (nel caso sussista tale pericolo, utilizzare vestitario di protezione adeguato)
- La cera è da immettere nella cavo orale solo per breve tempo e non in modo molto prolungato o permanente.
- Predisporre la base in cera in modo tale che non possa, accidentalmente, essere ingoiata dal paziente durante la prova del montaggio

4 Istruzioni d'uso:

4.1. Preparazione: Aprire la scatola nella apertura prevista

4.2. Utilizzo:

Disinfettare la cera e riscaldare leggermente con il bunsen (becco a gas) o in „bagno d'acqua“. Inserire la cera di registrazione nel cavo orale e, dopo aver impartito le istruzioni necessarie al paziente, procedere alla registrazione dell'occlusione. Terminata l'operazione raffreddare la cera ed estrarla con attenzione dalla bocca del paziente.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- Pulire e disinfettare la cera di registrazione.
- Chiudere la scatola e proteggere dalla polvere.

5. Eliminazione: Per l'eliminazione della cera seguire la normativa vigente.

Istruzioni per l'uso

Pagina - 2 -

stato 01/96

6. **Durata:**

È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell'imballo originale. L'aroma delle cere non è tossico e si volatilizza.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania

Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-2533