



1. Generale:

1.1. Articolo e

1.2. Quantità di consegna:

- Barre di cera, gialla, morbida, con aroma di limone **490g art. 612-0490, 1850 g art. 612-1850**
- Barre di cera, verde, media dura, con aroma di mela **490g art. 614-0490, 1850g art. 614-1850**
- Barre di cera, rossa, dura, con aroma di fragola **490g art. 613-0490, 1850 g art. 613-1850**
- Barre di cera **curve**, gialla, morbida, con aroma di limone **96pz art. 610-0100e**
- Barre di cera **curve**, verde, media-dura, con aroma di mela **96pz art. 612-0100**
- Barre di cera **curve**, arancione, media-dura, con aroma di arancia **96pz art. 613-0100**
- Barre di cera **curve**, rossa, dura, con aroma di fragola **96pz art. 611-0100**

1.3. Indirizzo del produttore:

YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen

Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100

Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere a temperatura ambiente min. +10°C max. +30°C
- proteggere dai raggi solari
- temperature al di sotto di +8°C ne aumentano la fragilità
- tenere in un luogo sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri danni

2. Uso secondo le norme:

Le Barre e i Valli in cera vengono utilizzati per protesi parziali e totali nel laboratorio odontotecnico. Il medico dentista potrà poi procedere, nella bocca del paziente, alla registrazione dell'occlusione. Riscaldata con il bunsen (becco a gas) o in „bagno d'acqua“, la forma in cera diventa modificabile e sagomabile. Il processo di scoglimento e/o ammorbidimento va eseguito solo con strumenti adatte e da personale qualificato e adeguatamente istruito, **comunque sempre al di fuori del cavo orale del paziente**. Per la registrazione sono da immettere nel cavo orale solo Barre e Valli in cera non troppo caldi (pericolo di bruciature alle mucose) e in dimensioni tali da evitare che possano essere ingoiati e provocare asfissia.

Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e / o possano venire a contatto con la Barre e Valli in cera (rischio di deglutizione)
- Evitare che gocce calde di cera cadano sulla pelle (rischio di bruciature). Se la cera calda viene a contatto con acqua può schizzare in modo non controllabile e causare ferite. (nel caso sussista tale pericolo, utilizzare vestitario di protezione adeguato)
- La cera è da immettere nella cavo orale solo per breve tempo e non in modo molto prolungato o permanente.
- Le Barre diritte e/o i Valli curvi in cera sono da collegare alla base (in cera o in resina o in materiale termo-modificabile) in modo molto sicuro e adeguato per non rischiare che gli stessi possano essere ingoiati dal paziente con il conseguente pericolo di asfissia.

4 Istruzioni d'uso:

4.1. Preparazione: Aprire la scatola nella apertura prevista

4.2. Utilizzo:

- Tagliare le Barre e/o i Valli in cera con una spatola per cera apposita o con uno strumento caldo. Riscaldare poi leggermente la cera con il bunsen (becco a gas) o in „bagno di acqua“ e adattare e collegare molto bene alla base di supporto. Nel caso di piccole porzioni di cera fare attenzione che vengano attaccate molto bene affinché non si possano poi staccare dalla base.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- Riporre i resti di Barre o Valli in cera nel loro imballo originale.
- Chiudere la scatola e proteggerla dalla polvere.

5. Eliminazione: Per l'eliminazione delle cere seguire la normativa vigente.

6. Durata:

È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell'imballo originale. Gli aromi delle Barre e dei Valli in cera non sono tossici e si volatilizzano.