



## 1. Generale:

### 1.1. Denominazione del prodotto

- SOLIDUS 80 cera rosa in fogli per protesi totali, 1,5 mm dura, **articolo 680-0000**
- SOLIDUS 84 cera rosa in fogli per protesi totali, 1,5 mm extra dura, **articolo 684-0000**

**1.2. Quantità di consegna:** SOLIDUS 80 contenuto 500 gr.  
SOLIDUS 84 contenuto 500 gr.

**1.3. Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

### 1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere a temperatura ambiente min. +10°C max. +30°C
- proteggere dai raggi solari
- temperature al di sotto di +8°C ne aumentano la fragilità
- tenere in un luogo sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri danni

## 2. Uso secondo le norme:

Le cere in fogli vengono utilizzate per protesi parziali e totali nel laboratorio odontotecnico, come base per il montaggio dei denti e per la prova dello stesso nella bocca del paziente. La cera sciolta va lavorata con strumenti adatti per la ceratura e la modellazione e solo da personale istruito. **La lavorazione e la modellazione di SOLIDUS è da fare sempre al di fuori del cavo orale. Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.**

## 3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e / o possano venire a contatto con SOLIDUS (rischio di deglutizione)
- Evitare che gocce calde di cera cadano sulla pelle (rischio di bruciature). Se la cera calda viene a contatto con acqua può schizzare in modo non controllabile e causare ferite. (nel caso sussista tale pericolo, utilizzare vestitario di protezione adeguato)
- Evitare l'inspirazione dei vapori che si possono sviluppare dalla fusione della cera.
- Predisporre la base in cera in modo tale che non possa, accidentalmente, essere ingoiata dal paziente durante la prova del montaggio

## 4. Istruzioni d'uso:

### 4.1. Preparazione:

Aprire la scatola nella apertura prevista

### 4.2. Utilizzo:

Tagliare il foglio di cera con una spatola apposita o con uno strumento caldo. Riscaldare poi la cera con il bunsen (becco a gas) o in "bagno di acqua" fino ad una consistenza plastica facilmente modificabile e modellabile. Adattare con le mani o con uno strumento adeguato il foglio di cera al modello precedentemente isolato con YETI LUBE art. 550-0060.

### 4.3. Dopo l'utilizzo:

- Riporre i resti del foglio di cera nel suo imballo originale
- Chiudere la scatola e proteggere dalla polvere

**5. Eliminazione:** Per l'eliminazione delle cere seguire la normativa vigente.

**6. Durata:** È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell'imballo originale.